

Bedienungsanleitung

Air Walker AT53008



MD



Hersteller:
ANTAR SpJ.,
03-068 Warszawa,
ul.Zawiślańska 43

Tel. 225183600
Fax 225183630
www.antar.net





Air Walker 53008

Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb dieses hochwertigen Medizinprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam und genau durch. Beachten Sie stets die Hinweise und Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Patienten als Anwender des Produkts.

Verwendungszweck

Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position. Die Orthese ist beidseitig einsetzbar.

Lieferumfang

- Eine Orthese, drei kleine Ausgleichpolster, Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produkts und sollte griffbereit aufbewahrt werden.
- Produktinformationen wie Modellname und Schuhgröße befinden sich auf dem Typenschild auf der Verpackung.

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z.B.:

- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch

Kontraindikation

Bei folgenden Erkrankungen darf die Orthese erst nach Rücksprache mit einem Arzt getragen werden:

- Ausgeprägte Neuropathie (Sensibilitätsverlust)
- Ausgeprägte Angiopathie (Durchblutungsstörungen)

Air Walker 53008

Anwendungshinweise

- Überprüfen Sie die Orthese vor jeder Benutzung auf Unversehrtheit. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ziehen Sie das Produkt sofort aus dem Verkehr und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Bei allergischen Reaktionen durch die erzeugte Wärme, sollte die Orthese abgenommen und der Arzt konsultiert werden.
- Eine falsch angelegte Orthese kann zu Druckstellen und dem Verlust der Fixierfunktion führen; beachten Sie die Anziehanleitung.
- Die Orthese sollte fest, aber nicht zu eng sitzen. Die Luftkammer darf nicht zu fest aufgeblasen werden. Eine zu eng anliegende Orthese, oder eine zu fest aufgeblasene Luftkammer können die Blutzirkulation einschränken. Eine zu locker anliegende Orthese führt zum Verlust der Fixierfunktion.
- Schließen Sie immer sämtliche Klettverbindungen. Das Offenlassen einzelner oder mehrerer Verschlüsse kann zu Stürzen führen und verringert den therapeutischen Nutzen.
- Das Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet und darf nur von einem Patienten verwendet werden.
- Die Orthese darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.
- Halten Sie das Produkt von Flammen fern.
- Verzichten Sie auf das Führen von Kraftfahrzeugen, solange Sie die Orthesen tragen, die Ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gehstütze, um die Gefahr von Stürzen zu vermindern und die Fußgelenke zu entlasten.

VORSICHT:

Wenn ein produktbezogener „schwerwiegender Vorfall“ auftritt, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat oder führen könnte:

- a) Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person oder
- b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person, oder
- c) eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit

Der oben genannte „schwere Vorfall“ muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient ansässig ist.

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen störenden, für den Benutzer unklaren Symptomen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Medizinprodukts konsultieren Sie einen Arzt.

HINWEIS: Das Produkt hat scharfe Kanten.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Das Medizinprodukt kann als normaler Siedlungsabfall entsorgt werden.

Air Walker 53008


Anziehen/ Ausziehen

Die Auswahl der richtigen Orthese sowie deren individuelle Anpassung ist wichtig für den Erfolg Ihrer Behandlung und sollte daher in Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt, Fachhändler oder qualifiziertem medizinischen Personal erfolgen.



1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse. Stellen Sie Ihren Fuß in die Schaumstoffeinlage in der Schale und drücken Sie diese an das Bein. Legen Sie die runde Lasche über den Fußrücken.
2. Um evtl. entstandene Freiräume abzupolstern, benutzen Sie die beigefügten kleinen Ausgleichpolster.
3. Verschließen Sie nacheinander die Riemen mit den Klettverschlüssen am Knöchel, Fuß und Unterschenkel, so dass die Orthese bequem am Fuß sitzt.
4. Achten Sie darauf, dass alle drei Riemen sorgfältig geschlossen sind.

Einstellen des Luftdrucks in der Kammer

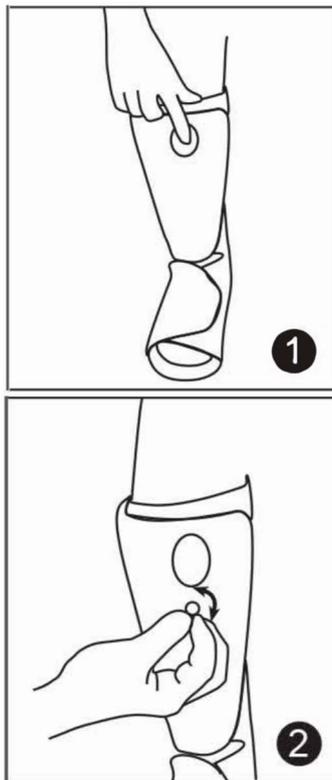

1. Drehen Sie zum Aufblasen den Knopf in die Position „Inflate“, drücken Sie dann mehrfach die Pumpe (roter Punkt), um die Kammer aufzublasen. Die Kammer soll Halt geben und sich bequem anfühlen.
2. Sollte sich der Air Walker zu eng anfühlen, drehen Sie den Knopf in Richtung „Deflate“ um die Luft entweichen zu lassen. So gehen Sie auch vor, wenn Sie den Air Walker ausziehen möchten.

PATIENTENZIELGRUPPE

Personen, die an Krankheiten, Funktionsstörungen oder Verletzungen leiden, für deren Behandlung/Rehabilitation oder Kompensation dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt über die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes in dieser Anleitung). Das Produkt kann vom Anwender selbst oder auf Empfehlung eines Arztes, Therapeuten oder anderen Spezialisten erworben werden. Unabhängig davon, ob Sie das Produkt selbst oder auf Empfehlung eines Arztes/Therapeuten/anderen Fachmanns kaufen, müssen Sie die verfügbaren Größen/erforderlichen Funktionen/Größen/Varianten des Produktes, die Indikationen und Kontraindikationen für den Gebrauch sowie die vom Hersteller bereitgestellten Informationen berücksichtigen.

Air Walker 53008

Produktmerkmale


- Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten
- Gurte mit regulierbaren Klettverschlüssen
- Selbsttragende Kunststoffschale mit Laufsohle
- Polsterung mit aufblasbarem Luftpolster

Nutzungsdauer

Die maximale Nutzungsdauer des Produkts ist abhängig von der jeweiligen Situation des Patienten. Die Dauer richtet sich nach der Indikation und dem Therapiezeitraum. Bei Beachtung der beiliegenden Reinigungs- und Pflegehinweise beträgt die maximale Nutzungsdauer 12 Monate. Nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft können Sie das Produkt auch länger verwenden, solange es sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung entfernen Sie die Polster und Stoffe aus dem Kunststoffteil. Waschen Sie die Polster und Stoffe bei maximal 30°C per Hand mit einer milden Seife. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach und lassen Sie die Polster und Stoffe an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Keine Bleichmittel verwenden und nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen aussetzen.

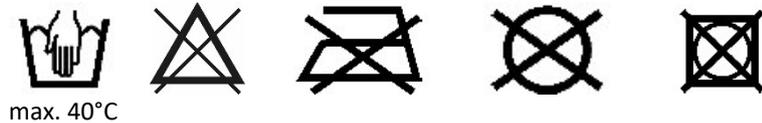

Die Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch unter Verwendung eines milden, haushaltsüblichen Reinigungsmittels abgewischt werden.

Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel wie Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel oder harte Bürsten.



Air Walker 53008

Wartungshinweise

Das Produkt ist wartungsfrei.

Technische Daten

Produkt:	Air Walker AT53008
Farbe:	Schwarz
Material:	
Kunststoffschale:	85% PP, 15% Glasfiber
Polsterung:	11,75% PE, 11,75% Nylon, 76,5% PU
Gurte:	Nylon mit Klettband aus Polyamid

Größentabelle

Air Walker Größe	Schuhgröße
S	36 – 39
M	40 – 44
L	44 – 46,5
XL	46,5+

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Recyclingvorschriften. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.



Air Walker 53008

GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers

- 1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 2, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.
- 2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.
- 3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich AN TAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen. AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.
- 4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von AN TAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- 5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.
- 6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.
- 7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigelegt werden.
- 8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.
- 9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

 AN TAR Sp. J.
03-068 Warschau, ul. Zawiańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Verteiler:

Antar Medizin GmbH
Döbelner Str. 2 Aufgang A, 12627 Berlin
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821
E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Revision: November 16