

Gebruiksaanweisung

Badewannen Einstiegshilfe GRIP+

MOBILITY **Plus**+



MOBILITY Plus+

Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis	2
Lieferumfang/Teile	3
Allgemeines.....	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung.....	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise.....	5
Verwendung Badewannen Einstiegshilfe GRIP+	7
Einstiegshilfe an der Badewanne befestigen.....	7
Reinigung und Pflege	8
Technische Daten.....	9
Entsorgung	9

MOBILITY Plus+

Lieferumfang/Teile



1 x Verpackungs - / Transportkarton
1 x Gebrauchsanweisung

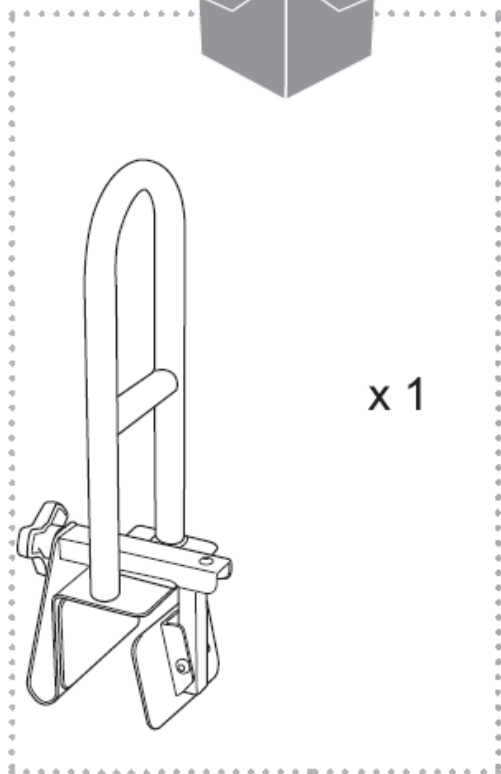

x 1

1x Badewannen Einstiegshilfe mit Verstellschraube

Die Badewannen Einstiegshilfe wird in einem Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der Badewannen Einstiegshilfe GRIP+ von MOBILITY Plus+. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Badewannen Einstiegshilfe verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Badewannen Einstiegshilfe oder Ihrer Badewanne führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Badewannen Einstiegshilfe an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Badewannen Einstiegshilfe oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Badewannen Einstiegshilfe GRIP+ ist ausschließlich als Hilfe für den Ein- und Ausstieg an einer Badewanne konzipiert. Die Badewannen Einstiegshilfe muss vor dem Gebrauch korrekt und sicher installiert werden.

Die Badewannen Einstiegshilfe ist ausschließlich für eine maximale Zugbelastung von 65 kg konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Badewannen Einstiegshilfe ist kein Kinderspielzeug, kein Medizinprodukt und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Verwenden Sie die Badewannen Einstiegshilfe nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie oder mit Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen, die Folie über ihren Kopf stülpen oder die Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Verpackungsfolie und Kleinteile von Kindern fern.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Badewannen Einstiegshilfe kann zu Verletzungen führen.

- Benutzen Sie die Badewannen Einstiegshilfe nicht gleichzeitig mit mehreren Personen.
- Verwenden Sie die Badewannen Einstiegshilfe nicht als Halterung oder Ablage.
- Verwenden Sie die Badewannen Einstiegshilfe nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben oder wenn die Metall- oder Kunststoffteile Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.

MOBILITY Plus+

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Badewannen Einstiegshilfe kann zu Beschädigungen an der Einstiegshilfe und der Badewanne führen.

- Verwenden Sie die Badewannen Einstiegshilfe nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben oder wenn die Metall- oder Kunststoffteile Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Verändern Sie die Konstruktion der Badewannen Einstiegshilfe nicht.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Elemente an der Badewannen Einstiegshilfe.
- Verwenden Sie die Einstiegshilfe ausschließlich an einer Badewanne.

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Badewannen Einstiegshilfe beschädigen.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Badewannen Einstiegshilfe aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (s. Lieferumfang/Teile).
 3. Prüfen Sie, ob die Badewannen Einstiegshilfe Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Einstiegshilfe nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Verwendung Badewannen Einstiegshilfe GRIP+

Geeignet für handelsübliche Badewannen, die fest vermauert sind und typischerweise außen mit Fliesen bzw. festen Belägen belegt sind. Prüfen Sie speziell bei Badewannen, die nicht aus Stahl gefertigt sind (Acryl etc.), ob eine stabile Hinterfüllung zwischen dem oberen Wannenrand und der sog. Außenwand gegeben ist, damit ein festes stabiles Verklemmen möglich ist.

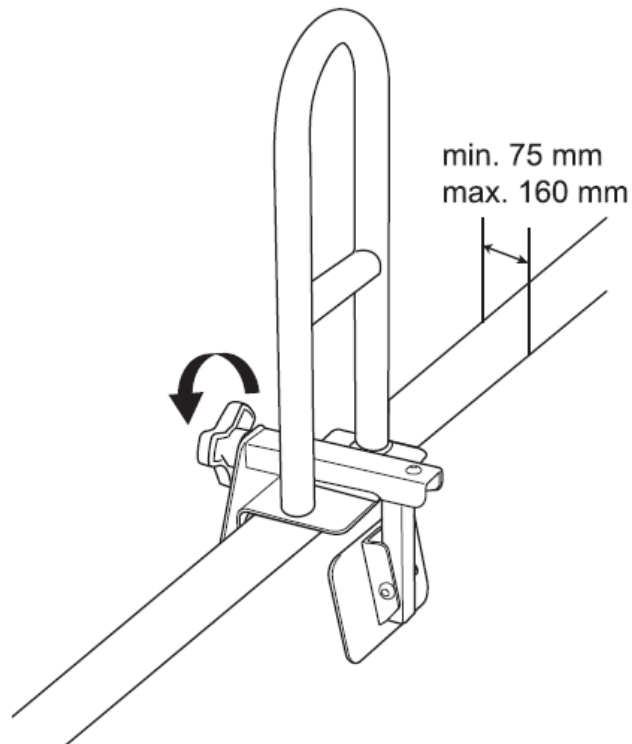

Einstiegshilfe an der Badewanne befestigen

Sie können die Einstiegshilfe an handelsüblichen Badewannen mit einer Randstärke von 75–160 mm befestigen.

- Achten Sie darauf, dass der Bereich der Badewanne und die Einstiegshilfe trocken ist.
- Fixieren Sie die Einstiegshilfe mithilfe der Verstellerschraube.
- Achten Sie auf die richtige und sichere 90°-Positionierung der Einstiegshilfe am Badewannenrand.
- Drehen Sie die Verstellerschraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest angezogen ist.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Einstiegshilfe fest in der Badewanne sitzt.

MOBILITY Plus+

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung der Badewannen Einstiegshilfe kann zu Beschädigungen an der Oberfläche führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
 1. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch.
 2. Trocknen Sie die Einstiegshilfe nach der Benutzung und nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 3. Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.

MOBILITY **Plus+**

Technische Daten

- Modell: GRIP+
- Gewicht: ca. 3 kg
- Abmessungen H x B x L: 50 x 19,5 x 15 cm
- Artikelnummer: 1010529
- Maximale Zugbelastung: 65 kg
- Klemmhöhe: 10 cm
- Klemmbreite: 7,5 bis 16 cm
- Material: Stahl

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff -Sammlung.

Badewannen Einstiegshilfe entsorgen

Entsorgen Sie den Einstiegshilfe entsprechend denen in Ihrem Land geltenden Bestimmungen und Gesetzen.

MOBILITY **Plus+**

GRIP+

Rehab Direct GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Str. 6-8
68219 Mannheim, Deutschland

Service-Hotline
+49 621 – 950 495 55

Stand 15.06.2023