

DE



AT51006 | AT51006R | AT51006A

ROLLATOR

GEBRAUCHSANWEISUNG



Der Rollator ist mit einer abnehmbaren Schultertasche, Feststellbremse und einem Sitz mit Polsterlehne ausgestattet. Die Griffhöhe ist einstellbar und der Rollator kann zum Transport oder zur Lagerung zusammengeklappt werden. Vor dem Zusammenklappen oder der ersten Benutzung des Rollators ist die Gebrauchsanweisung genau zu lesen und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Vor dem genauen Lesen dieser Gebrauchsanweisung darf das Gerät NICHT zusammengeklappt oder benutzt werden.

BESTIMMUNG

Das Gerät dient als Geh-, Stütz- und Traghilfe beim Tragen kleinerer Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist für den Gebrauch durch einen Benutzer mit einer beschränkten Bewegungsfähigkeit und der nachstehend genannten maximalen Größe bestimmt. Um die Sicherheit des Benutzers des Rollators zu gewährleisten, soll der Benutzer entsprechende körperliche, Seh- und kognitive Fähigkeiten besitzen. Im Zweifel kontaktieren Sie den Verkäufer/ Spezialisten, der die Benutzung des Rollators verschrieben hat.

Es ist sehr wichtig, dass der Benutzer vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung genau in Kenntnis nimmt. Die hier genannten Hinweise sollen eventuelle Körperverletzungen des Benutzers oder Dritter, sowie Beschädigung des Rollators oder der daneben befindlichen Gegenstände verhindern.

HINWEIS:

Auf den einzelnen Teilen des Rahmens darf nicht gestanden werden. Der Rahmen des Gerätes ist nicht zu solchem Zweck vorgesehen.

SICHERHEIT

Der Rollator kann durch eine Person mit einem Gewicht von max. 136 kg benutzt werden.

ES IST ZU BEACHTEN:

- (1) Vergewissern Sie sich, dass die Bremse eines unbeaufsichtigt gelassenen Rollators immer gesperrt ist.
- (2) Vor dem Gebrauch vergewissern Sie sich, dass alle Räder, vor allem die beweglichen Räder sicher befestigt sind.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass die Bremsen richtig funktionieren.
- (4) Vor dem ersten Gebrauch prüfen Sie die Griffhöhe und ihre richtige Befestigung.
- (5) Vergewissern Sie sich, dass der Rollator vollständig aufgeklappt ist.
- (6) Beim Aufklappen des Rollators soll der Rahmen in der richtigen Position gesperrt werden.
- (7) Beim Tragen des zusammengeklappten Rollators ist Vorsicht geboten.
- (8) Um ein Einklemmen der Hände oder Finger zu vermeiden, halten Sie sie vom Klappmechanismus fern.
- (9) Um den Rollator an Ihre Bedürfnisse gut anzupassen, lassen Sie sich von einem Mediziner oder Fachmann beraten.
- (10) Beim Heben oder Tragen des Rollators ist Vorsicht geboten.

ES IST VERBOTEN:

- (1) Den Rollator zum Fahren von Personen zu benutzen - das Gerät wurde nicht als Rollstuhl entwickelt.
- (2) Sich auf den Rollator ohne gesperrte Bremse zu setzen - das kann den Rollator in Bewegung setzen und es kann zu Körperverletzungen beim Benutzer oder bei Dritten kommen.
- (3) Sich auf den Rollator bei der eingestellten Neigung zu setzen.
- (4) Sich auf den Sitz mit Schwung zu setzen - setzen Sie sich vorsichtig und kontrolliert, bei Bedarf bitten Sie um Hilfe.
- (5) Auf den Bremshebeln oder Griffen keine Gegenstände hängen, das kann die Funktion der Bremsen und/ oder die Stabilität des Rollators beeinträchtigen.
- (6) Sich auf den Rollator zu stellen oder ihn als Fußstütze zu nutzen.

AUFBAUANWEISUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Rollator während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei sichtbaren Beschädigungen benutzen Sie den Rollator nicht. In diesem Fall kontaktieren Sie den Verkäufer, um den Rollator reparieren zu lassen oder ihn zurückzugeben.



- A - Lehne
- B - Bremshebel
- C - Griffe mit Höhenregelung
- D - Sitz
- E - Schultertasche mit Gürtel
- F - Hintere Befestigungsstifte
- G - Befestigungsknöpfe (2)
- H - Hinterräder Durchmesser 8"
- I - Vorderräder Durchmesser 8"

Die Verpackung entfernen. Der Rollator ist zusammengeklappt-Abb. 1.

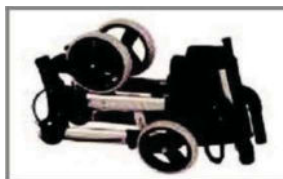


Abb. 1.

2. Die Vorderräder aufklappen und mit den Befestigungsknöpfen sperren - Abb. 2

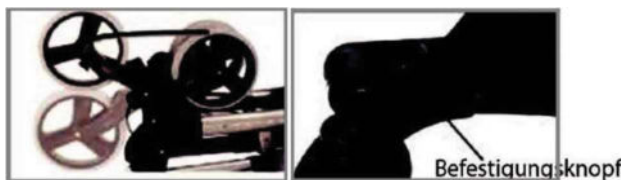


Abb. 2.

3. Die Hinterräder aufklappen und mit den hinteren Befestigungsstiften sperren - Abb. 3



Abb. 3

4. Den Rollator aufklappen, den Sitz auf beiden Seiten nach unten drücken - Abb. 4.

HINWEIS: Beide Seiten müssen in einer entsprechenden Stellung mit einem hörbaren "Klick" gesperrt werden.



Abb. 4

5. Die Tasche aufhängen.

HÖHENEINSTELLUNG

Vor dem ersten Gebrauch des Rollators vergewissern Sie sich, dass er vollständig aufgeklappt ist und dass der Rahmen richtig gesperrt und steif ist. Es ist wichtig, die Höhe des Rollators richtig zu einer komfortablen Position einzustellen. Zu diesem Zweck lassen Sie die Hände an den Seiten hängen und stellen Sie die Griffe des Rollators auf der Höhe der Handgelenke ein.

2. Nach Ablegen der Hände auf den Griffen sollen die Ellbogen im Winkel von 15°-20° gebogen werden.

3. Sind Sie gezwungen, sich zu neigen oder die Arme zu heben, um den Rollator zu erreichen, stellen Sie die Füße richtig ein.

4. Dazu drücken Sie den Federknopf und stellen den Rollator in der richtigen Höhe ein.

5. Wiederholen Sie die Tätigkeit auf der anderen Seite des Rollators und prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob beide Griffe auf derselben Höhe und richtig gesperrt sind.



Federknopf

Einstellungsbereich der Griffhöhe: 80 - 92,5 cm

HINWEIS: Um die richtige Höhe des Rollators festzulegen, kontaktieren Sie ihren Arzt oder Therapeuten.

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG DER BREMSEN

1. Um die Bewegung des Rollators zu verlangsamen, ziehen Sie den Bremshebel nach oben.
2. Den Bremshebel nach unten drücken, um die Hinterräder zu sperren und hochziehen, um die Sperre zu lockern (s. Abb. 5).

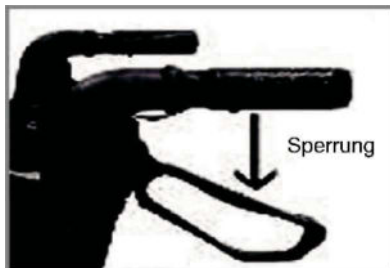


Abb. 5

HINWEIS: Die Funktion der Bremssperre kann durch diese Einstellung der Bremsen beeinflusst werden, da zu ihrer Sperrung leichtes Drücken des Bremshebels ausreichend ist.

Bremseinstellung: Um die Spannung des Bremsseils zu erhöhen, drehen Sie die Regulationsschraube gegen den Uhrzeigersinn; anschließend - um diese Einstellung beizubehalten - drehen Sie den Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei die Regulationsschraube fest (s. Abb. 6).



Sicherungsmutter

Abb. 6

HINWEIS: Die Funktion der Bremssperre kann durch diese Einstellung der Bremsen beeinflusst werden, da zu ihrer Sperrung leichtes Drücken des Bremshebels ausreichend ist.

ZUSAMMENKLAPPEN UND LAGERUNG DES ROLLATORS

1. Ziehen Sie den Riemen im mittleren Teil des Sitzes nach oben, um den Rollator zusammenzuklappen - Abb. 7.



Abb. 5

2. Den Rollator zusammenklappen. Die hinteren Befestigungsstifte herauschieben und die Räder wie in Abb. 8 zusammenklappen.



Abb. 8

3. Um den Rollator in einer Reisetasche zu verstauen, senken Sie die Griffe in die minimale Höhe und führen Sie die o.g. Schritte 1 und 2 durch. Die Befestigungsknöpfe abdrehen und die Vorderräder zusammenklappen.
4. Um eine möglichst kleine Größe des Rollators zu erreichen, können auch die Vorderräder zusammengeklappt werden.

WARTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass ALLE Ausstattungsteile immer richtig zuge dreht sind.
2. Prüfen Sie, ob die Schrauben, Knöpfe und Drehknöpfe der Räder und der beweglichen Räder zugeschraubt sind.
3. Prüfen Sie, ob die Bremse richtig funktioniert und die Griffe richtig gesichert sind.
4. Verbrauchte oder beschädigte Teile sind unverzüglich auszutauschen.

Zur Reinigung des Rollators benutzen Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und warmes Wasser mit Seife. Bei Bedarf können auch übliche Desinfektionsmittel benutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass auf den gereinigten Flächen kein Wasser oder Reinigungsmittelreste zurückbleiben. Benutzen Sie keine rauen Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände - sie können die Lackschicht beschädigen.

Gebrauchsanweisung - Anhang
Vom MDR geforderte Informationen und Warnungen

WARNUNG:

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalles in Bezug auf das Medizinprodukt, der direkt oder indirekt zu einer der folgenden Ursachen geführt hat oder führen könnte:

- a) den Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
- b) die vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person;
- c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit;

Der oben genannte schwerwiegende Vorfall ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

WARNUNG:

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen besorgniserregenden Symptomen, die für den Benutzer unklar sind und in Bezug auf das Medizinprodukt aufgetreten sind, sollte der Benutzer einen Arzt konsultieren.

SICHERE ENTSORGUNG DES MEDIZINISCHEN GERÄTS

Wenn das Gerät außer Betrieb genommen wurde, kann es mit Ausnahme von elektrischen Medizinprodukten als Siedlungsabfall behandelt werden. In diesem Fall muss das elektrische medizinische Gerät auf die vom Gesetz für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott beschriebene Weise entsorgt werden.

INFORMATION



Dieses Symbol bedeutet: "Maximales Benutzergewicht"

Garantieschein

Modell:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Siegel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers

- 1) I. ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisła'1ska 43. gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer.
 2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
 3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen. falls angenommen werden muss. dass eine Reparaturunrentabel wäre.
 4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
 5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten.
- Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
 7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEM KAUFNACHWEIS (KASSENBON ODER RECHNUNG), BITTE FUGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI.
 8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 Polen
Tel. +48 22 518 36 00, Fax +48 22 518 36 30
www.antar.net courriel: antar@antar.net

